

2019-nCoV Ag SALIVA RAPID TEST CARD

So einfach kann Testen heute sein

Der zweiteilige Speicheltest funktioniert

- ohne Abstrich
- ohne Reagenzflüssigkeit
- liefert Testergebnisse in nur 10 Min.

Ideal für Kinder und für Menschen mit Beeinträchtigungen


Vorteile


- Kein Abstrich notwendig
- Speichelsammlung mittels Schwämmchen auf Griffstück
- Schwämmchen besteht aus Watte (Zellulose)
- keine Chemie, kein Reagenz

Zuverlässige Testergebnisse

Sensitivität: 95,6% Spezifität: 98,4% Konsistenz: 97,1%



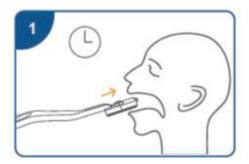

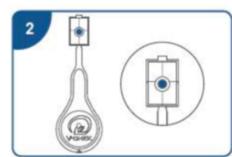



TEL: +86-020-82557192 service@dochekbio.com www.dochekbio.com





Caretechion GmbH Niederrheinstr. 71, 40474 Duesseldorf, Germany







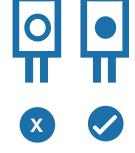

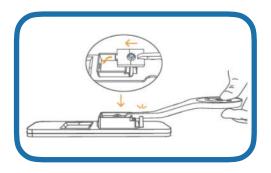



1. Test in den Mund nehmen

Nehmen Sie das Griffstück mit dem Schwämmchen in den Mund und und bewegen Sie es ca. 90 sek. hin und her, um von verschiedenen Stellen im Mund Speichel aufzusammeln.

Jede Speichelart ist für den Test geeignet. Ideal ist es jedoch am Morgen, noch vor dem Zähneputzen zu testen, oder ca. 15 min. vor der Testung nicht zu essen oder zu trinken.

Das Schwämmchen besteht aus Mikrozellulose (Watte), beinhaltet keine Reagenzien oder Chemikalien und ist gesundheitlich vollkommen unbedenklich.

2. Feuchtigkeit prüfen

Nach ca. 90 sek. nehmen Sie das Griffstück aus dem Mund. Ist das Schwämmchen gut mit Speichel durchtränkt, zeigt sich ein blauer Punkt.

Ist der blaue Punkt nicht oder nur schwach erkennbar, nehmen Sie das Griffstück nochmals für einige Zeit in den Mund, um das Schwämmchen noch besser zu durchfeuchten.

Der blaue Punkt auf der Rückseite des Griffstücks besteht aus Lebensmittelfarbe und ist gesundheitlich ebenfalls völlig unbedenklich.

3. Griffstück in Test einlegen

Legen Sie das Griffstück in die Testkassette ein. Die Spitze des Schwammkopfs dazu in die Ausbuchtung der Kassette schieben.

Drücken Sie nun das Griffstück nach unten bis es mit einem Klick einrastet. Das Schwämmchen wird dadurch auf den Teststreifen gedrückt. Die Testreaktion beginnt.

4. Ergebnis ablesen

Warten Sie 10 Minuten, bis Sie das Testergebnis ablesen.

Interpretieren Sie das Ergebnis wie unten dargestellt.

Ein zu frühes oder zu spätes Ablesen kann zu falschen Ergebnissen führen.

